



Gebruik van de Philips Heartstart HS1 Trainer met afstandsbediening

Er komen regelmatig storingsmeldingen binnen over de Philips Heartstart HS1 trainer met afstandsbediening. In veel van de gevallen blijkt dat het een gebruikersfout betreft. Met deze reden wordt hierbij het gebruik van de trainer nogmaals uitgelegd.

Gebruik van de trainer

Voor het in gebruik nemen van de trainer dient deze te worden voorzien van vier AA-batterijen. Deze kunnen aan de achterzijde van de trainer worden geplaatst. Daar een afstandsbediening is gekoppeld aan één specifieke trainer dient de code van de trainer te worden gecontroleerd en geverifieerd met de afstandsbediening.

Er zijn meerdere scenario's welke kunnen worden gehanteerd. Op de achterzijde van de AED ziet u welk scenario welk protocol doorloopt. Stel middels de blauwe I-knop het gewenste protocol in alvorens de training te starten.

Scenario's doorlopen



Schok aanbevolen



Geen schok aanbevolen



Plaats de elektroden (niet goed geplaatst)

1: elektroden plaatsen – (Elektroden geplaatst? druk op A om door te gaan) - schok aanbevolen/toedienen – start reanimatie – geen schok aanbevolen

2: elektroden plaatsen - (Elektroden geplaatst? druk op A om door te gaan) - schok aanbevolen/toedienen – start reanimatie - schok aanbevolen/toedienen – reanimatie – geen schok aanbevolen

3: Elektroden plaatsen – (Elektroden geplaatst? Druk op A om door te gaan. De trainer zal blijven vragen om de elektroden te plaatsen. Druk op B en vervolgens weer op A om door te gaan) - schok aanbevolen/toedienen – reanimatie – geen schok aanbevolen

4: Plaats elektroden - (Elektroden geplaatst? druk op A om door te gaan) - schok aanbevolen/toedienen – start reanimatie - geen schok aanbevolen - start reanimatie - schok aanbevolen/toedienen – start reanimatie – geen schok aanbevolen

5: Plaats elektroden - (Elektroden geplaatst? druk op A om door te gaan) - geen schok aanbevolen - start reanimatie

6: Plaats elektroden - (Elektroden geplaatst? druk op A om door te gaan) - schok aanbevolen/toedienen - start reanimatie - schok aanbevolen/toedienen - start reanimatie - geen schok aanbevolen

7: Plaats elektroden - (Elektroden geplaatst? druk op A om door te gaan) - schok aanbevolen/toedienen - start reanimatie - schok aanbevolen/toedienen - start reanimatie - geen schok aanbevolen - schok aanbevolen/toedienen - start reanimatie - geen schok aanbevolen

8: Elektroden plaatsen - (Elektroden geplaatst? Druk op A om door te gaan. De trainer zal blijven vragen om de elektroden te plaatsen. Druk op B en vervolgens weer op A om door te gaan) - schok aanbevolen/toedienen - reanimatie - schok aanbevolen/toedienen - reanimatie - geen schok aanbevolen

Tips voor gebruik

Om storingen te voorkomen kunt u onderstaande tips in acht nemen.

- Na elk gebruik de bedrading netjes in de cassette opbergen. Zorg er hierbij voor dat de draden niet te veel in elkaar zijn gedraaid
- Plak na elk gebruik de trainingssticker weer terug op de cassette voordat de deksel van de cassette wordt geplaatst
- Controleer de plaklaag regelmatig om te voorkomen dat deze niet meer werkt
- Indien er een storing voorkomt, controleer dan eerst de elektroden en vervolgens de cassette op juistheid, compleetheid en defecten

Gebruik zonder afstandsbediening

Gebruikt u de Philips Heartstart HS1 trainer met afstandsbediening in combinatie met een interne of externe adapter dan komt het gebruik van de afstandsbediening te vervangen. Let er hierbij op dat de plaklaag van de elektroden nog voldoende is, de adapter niet teveel gebruikssporen (scheurtjes ed.) vertoont en de elektroden juist worden gepositioneerd.

