

Reparatie

- Bij het onder stroom zetten, branden de witte controlelampjes niet
 1. Controleer de polariteit van de kabels.
 2. Controleer of de voedingskabel is aangesloten.
 3. Controleer de spanning (24VDC) aan de klem.
 4. Controleer of de klem goed is aangesloten.
 5. Neem contact op met uw partner.
- De witte controlelampjes knipperen niet meer in nachtfunctie.
 1. Controleer of de Aivia onder spanning staat.
 2. Neem contact op met uw partner.
- De rode controlelampjes knipperen niet als ik de kap open.
 1. Controleer of de Aivia onder spanning staat.
 2. Neem contact op met uw partner.
- De sirene wordt niet geactiveerd als ik de kap open.
 1. Controleer de 'Sirene' -optie op het identificatieplaatje.
 2. Controleer of de Aivia onder spanning staat.
 3. Neem contact op met uw partner.
- Ik ken mijn onderhouds/gebruikerscode niet.
 1. Zet de stroomtoevoer naar de Aivia af.
 2. Open de Aivia.
 3. Schakel de Aivia weer in, de witte controlelampjes zullen stationair zijn.
 4. Stel de gebruikers/onderhoudscode in zoals beschreven in de paragraaf 'De Aivia instellen'.
 5. Sluit de Aivia opnieuw.
- De rode controlelampjes knipperen herhaaldelijk.

Aantal Flitsen	Veroorzaken	Oplossing
1	Defect geheugen	Neem contact op met uw partner
2	Instelling verloren	de Aivia opnieuw instellen
3	Probleem met de temperatuursensor	Neem contact op met uw partner
4	Temperatuuralarm	Controleer of de defibrillator goed werkt, neem indien nodig contact op met uw partner
Continu	Voortdurend	Opening van de behuizing van de Aivia Controleer of de defibrillator goed werkt, of alle toebehoren aanwezig zijn Neem indien nodig contact op met uw partner.

- De elektrische bediening van de Aivia werkt niet.
Trek de dop van de kap van de Aivia weg en duw de borgingas van het deurtje terug met een stang

